

Terapia estética combinada



O novo aliado no combate à celulite e a gordura localizada é o Manthus, um equipamento que combina ultra-som, correntes elétricas e eletroporação, no tratamento a estes males e que promete resultado rápidos.

A terapia, combinada com diferentes programações, permite um tratamento personalizado, onde o ultra-som quebra os nódulos de gordura, a corrente elétrica fica responsável por acelerar a queima de gordura e a eletroporação libera ondas eletromagnéticas que abrem os poros permitindo que os ativos dos produtos aplicados realmente cheguem no interior da célula.

Para a consultora técnica do equipamento Manthus, Marta Cristina Petrolí, "A técnica é inovadora, pois associa o poder do ultra-som com os estímulos elétricos, sem causar nenhum desconforto, é muito segura e detém uma tecnologia única, que teve seu projeto estudado durante anos".

O tratamento é indolor, cada sessão leva em média 40 minutos e o número de sessões depende do biótipo de paciente, mas em uma sessão já é possível notar reduções de medidas.

O uso do equipamento não é aconselhável em casos de gravidez, infecções, áreas com circulação inadequada, marca-passo, diabetes e hipertensão não compensada.

A sessão inicia com a aplicação de um gel condutor na área a ser trabalhada, para facilitar o deslizamento dos cabeçotes do ultra-som na pele. No tratamento da celulite, o ultra-som trabalha associado a correntes elétricas e à eletroporação, neste caso é aplicado também um gel lipolítico, que inclui substâncias naturais que agem na quebra de gordura.

A sessão conta ainda com uma diferenciada drenagem linfática, que agiliza o processo de eliminação de líquidos.

Por: Priscila Yamakado Pilan Rahine

Fonte: Cuide-se Bem

Apoio: Soluzioni Estética telefone 16- 3620 3242

[Imprimir](#)